



Oxivir Sporicide Spray (RTU)

Opis

Diversey Oxivir Sporicide je dezinficijens spreman za upotrebu u jednom koraku, učinkovit protiv *Clostridioides difficile* i *Bacillus subtilis*. Na temelju Diversey patentirane formulacije ubrzanog vodikovog peroksida (AHP), Oxivir Sporicide može se koristiti na tvrdim, neporoznim površinama i neinvazivnim medicinskim uređajima. To je idealno rješenje za brzo i učinkovito kontroliranje i zaustavljanje širenja izbijanja *C. difficile*.

Ključna svojstva

- Učinkovito sredstvo za čišćenje i dezinfekciju spremno za upotrebu u 1 proizvodu
- Učinkovito protiv *C. difficile* u 5 minuta
- Djeluje baktericidno, virucidno, fungicidno i sporicidno za samo 1 minutu
- Pozitivan korisnički i površinski sigurnosni profil, u usporedbi s drugim sporicidnim proizvodima
- Bez mirisa
- Aktivni sastojak u AHP-u razgrađuje se na vodu i kisik - Nema ostataka jakih kemikalija na površini
- Ne sadrži klor ili alkohol

Prednosti

- Izvrstan odgovor na izbijanje *C. difficile*
- Široki spektar učinkovitosti protiv svih klasa patogena, uključujući bakterije, viruse, kvasce, gljivice i spore, pruža najvišu razinu zaštite pacijenata
- Kratko kontaktno vrijeme održava površinu mokrom čime se osigurava učinkovitost dezinficijensa
- Učinkovito spremno za upotrebu proizvod bez potrebe za razrjeđivanjem ili ispiranjem
- Ne uzrokuje iritaciju dišnog sustava
- Prikladan za upotrebu u visokorizičnim područjima u zdravstvu, uključujući ICU, NICU, sobe za pacijente i izolacijske sobe
- Raspršivač omogućuje učinkovitu primjenu


Upute za uporabu

1. Nosite odgovarajuće rukavice (pogledajte odjeljak o sigurnom rukovanju i skladištenju na stranici 2)
2. Uklonite veliku prljavštinu.
3. Nanesite na površine raspršivanjem na krpu za brisanje i brisanjem površina ili nanošenjem izravno na površinu pomoću raspršivača.
4. Nakon kontaktnog vremena navedenog na naljepnici, obrišite ili ostavite da se osuši na zraku.

Tehnički podaci

Izgled: Bistra, bezbojna tekućina
pH vrijednost (u upotrebi): $2,7 \pm 0,3$
Relativna gustoća (20°C): 1,033
720 dana (2 godine)
Gornji podaci tipični su za normalnu proizvodnju i ne smiju se uzimati kao specifikacija.

CE 0044

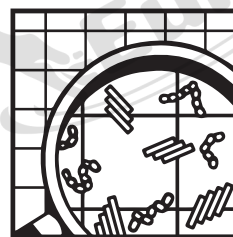

° A.I.S.E.

*Ova doza je u skladu s optimalnim uvjetima, preporuke mogu varirati, posavjetujte se sa svojim predstavnikom Diverseya za upute



Oxivir Sporicide Spray (RTU)

Informacije o sigurnom rukovanju i skladištenju

Preporučene rukavice za korištenje s Oxivir Sporicidom:

- # Robusne nitrilne bez pudera
- # Otpornost na kemikalije prema specifikaciji EN ISO 374-1:2016
- # Otpornost na mikroorganizme. Specifikacija EN ISO 374-5:2016

Potpune upute o rukovanju i odlaganju ovog proizvoda nalaze se u posebnom sigurnosno-tehničkom listu; sds.diversey.com. Čuvati u originalnim zatvorenim spremnicima daleko od ekstremnih temperatura.

Kompatibilnost proizvoda

Važno: Ne miješajte s drugim proizvodima.

Mikrobiološki podaci

Za podatke o učinkovitosti, pogledajte EN tablicu na zadnjoj stranici za dokazanu usklađenost s europskim normama

Podaci o zaštiti okoliša

Surfaktanti korišteni u ovom proizvodu su biorazgradivi u skladu sa zahtjevima Uredbe EU o deterdžentima, EC 648/2004.

Dostupne veličine pakiranja

Oxivir Sporicide dostupan je u bocama s raspršivačima, spremnim za upotrebu, od 6x750 ml i kao maramice spremne za upotrebu u paketima od 12x80 komada.

AHP® and Design and Oxivir® su zaštićeni pod Diversey INC.

Uvoznik i distributer u BiH:

Eurosan d.o.o.
Bišće polje bb Mostar
Telefon: +387 36 342 220
Email: info@eurosan.ba
Web: www.eurosan.ba

www.diversey.com

© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. en-GB 03/21 K00028



Oxivir Sporicide Spray (RTU)

		Prljavi uvjeti
	EN tests	Kontaktno vrijeme
Baktericidno	EN 1276*	1 min
	EN 13727	30 sec
	EN 13697*	1 min
Antigljivično	EN1650*	1 min
	EN13624	1 min
	EN 13697*	1 min
Virucidno	EN 14476	1 min
	(Adenovirus, Poliovirus, Murine Norovirus)	
Fungicidno	EN1650*	6 min
	EN13624	6 min
	EN 13697*	6 min
Mikobaktericidno	EN14348 Mycobacterium avium	5 min
	EN14348 Mycobacterium terrae	10 min
Sporicidno	EN 13704 (B. subtilis)*	15 min
	EN17126 (C. difficile)	5 min

* Testovi izvedeni na prljavim područjima koja nisu zdravstvena