



Oxivir Sporicide Wipe

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju neinvazivnih medicinskih uređaja i neporoznih tvrdih površina

Opis

Diversey Oxivir Sporicide Wipe dezinfekcijska je maramica za čišćenje u jednom koraku, učinkovita protiv *Clostridioides difficile* i *Bacillus subtilis*.

Na temelju Diverseyeve patentirane formulacije ubrzanog vodikovog peroksida (AHP), Oxivir Sporicide Wipe može se koristiti na tvrdim, neporoznim površinama i neinvazivnim medicinskim uređajima.

Ključna svojstva

- Učinkovito protiv *C. difficile* u 5 minuta
- Baktericidno, fungicidno, virucidno i sporicidno za samo 1 minutu
- Pozitivan korisnički i površinski sigurnosni profil, u usporedbi s drugim sporicidnim proizvodima
- Učinkovito sredstvo za čišćenje i dezinfekciju u 1 proizvodu
- Bez mirisa
- Aktivni sastojak AHP-a razgrađuje se na vodu i kisik tako da na površini ne ostaju štetni ostaci
- Ne sadrži klor ni alkohol


Prednosti

- Izvrstan, brz i učinkovit odgovor na epidemiju *C. difficile*
- Široki spektar učinkovitosti protiv svih drugih klasa patogena pruža najvišu razinu zaštite pacijenata
- Kratko vrijeme kontakta održava površinu vlažnom čime se osigurava učinkovitost dezinfekcije
- Nije potrebno ispiranje
- Ne uzrokuje iritaciju dišnog sustava
- Prikladno za korištenje u visokorizičnim područjima u zdravstvu, uključujući ICU, NICU, sobe za pacijente i izolacijske sobe

Upute za uporabu

1. Nosite odgovarajuće rukavice (pogledajte odjeljak o sigurnom rukovanju na stranici 2)
2. Uklonite veliku prljavštinu.
3. Otvorite paket maramice, izvadite jednu maramicu i zatvorite poklopac.
4. Obrišite površinu, uvjerite se da je cijela površina navlažena, ostavite da se osuši na zraku.
5. Osigurajte da površina ostane mokra tijekom vremena kontakta.
6. Promijenite maramicu kada ne vlaži površinu; vidljivo zaprljan ili prelazite na drugo područje čišćenja.

CE 0044

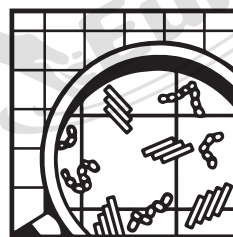

° A.I.S.E.

**Ova doza je u skladu s optimalnim uvjetima, preporuke mogu varirati, posavjetujte se sa svojim predstavnikom Diversey za upute*



Oxivir Sporicide Wipe

Tehnički podaci

Izgled: Polipropilenska maramica, 25GSM

Veličina maramice: 200 mm x 300 mm

pH vrijednost (u upotrebi): $2,7 \pm 0,3$

Relativna gustoća (20°C): 1,033

Gore navedeni podaci tipični su za normalnu proizvodnju i ne smiju se uzimati kao specifikacija.

Informacije o sigurnom rukovanju i skladištenju

Preporučene rukavice za korištenje Oxivir Sporicida:

Robusne nitrilne bez pudera

Otporne na kemikalije prema specifikaciji EN ISO 374-1:2016

Otporne na mikroorganizme. Specifikacija EN ISO 374-5:2016

Potpune upute o rukovanju i odlaganju ovog proizvoda nalaze se u posebnom sigurnosno-tehničkom listu; sds.
diversey.com Čuvati u originalnim zatvorenim spremnicima daleko od ekstremnih temperatura.

Kompatibilnost proizvoda

Treba nositi rukavice kada koristite Oxivir Sporicide maramicu.

Mikrobiološki podaci

Molimo pogledajte EN tablicu na posljednjoj stranici.

Ekološke informacije

Surfaktanti korišteni u ovom proizvodu su biorazgradivi u skladu sa zahtjevima Uredbe EU o deterdžentima, EC 648/2004.

Veličina pakiranja

Oxivir sporicidne maramice dostupne su u paketu od 12x80 komada.

AHP® and Design and Oxivir® su zaštitni znakovi tvrtke Diversey, INC.

Uvoznik i distributer u BiH:

Eurosan d.o.o.

Bišće polje bb Mostar

Telefon: +387 36 342 220

Email: info@eurosan.ba

Web: www.eurosan.ba

www.diversey.com

© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. en-GB 03/21 K00239



Oxivir Sporicide Wipe

		Dirty conditions
	EN tests	Contact time
Baktericidno	EN1276*	1 min
	EN13727	30 sec
	EN16615	1 min
Antigljivično	EN1650*	1 min
	EN13624	1 min
	EN 16615	1 min
Virucidno	EN14476	1 min
	(Adenovirus, Poliovirus, Murine Norovirus)	
Fungicidno	EN1650*	6 min
	EN13624	6 min
	EN16615	7 min
Mikobaktericidno	EN14348 Mycobacterium avium	5 min
	EN14348 Mycobacterium terrae	10 min
	EN16615 (Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae)	7 min
Sporicidno	EN13704 (B. subtilis)*	15 min
	EN17126 (C. difficile)	5 min

* Testovi provedeni na prljavim površinama na područjima koja nisu zdravstvena.