



Oxivir Excel

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju neinvazivnog medicinskog materijala i neporoznih površina

Opis

Diversey Oxivir Excel sredstvo za čišćenje i dezinfekciju s AHP tehnologijom je najbolja zamjena za tradicionalne dezinficijense. Ima potpuno virucidno djelovanje za samo 30 sekundi, a u isto vrijeme nježno djeluje na površine i predstavlja najmanji mogući rizik za osoblje i posjetioce. Aktivni sastojak hidrogen peroksid se razlaže na za okoliš sigurnu vodu i kisik par minuta nakon korištenja, bez ikakvih ostataka koji bi mogli oštetiti površinu ili promijeniti njen izgled.

Ključne karakteristike

- Potpuno virucidno djelovanje u samo 30 sekundi
- Brzo uništava širok spektar virusa, bakterija i kvasaca
- Superiorno čišćenje uz pomoć jako učinkovitog sistema surfaktanata
- Bez mirisa
- Bez ispiranja
- Sigurniji za okoliš, kao i za korisnike, jer se aktivna tvar raspada na vodu i kisik kao APE, NPE i VOC



Prednosti

- Širok spektar djelovanja omogućava najvišu razinu dezinfekcije. Opsežno testirano po europskim normama i učinkovito protiv velikog broja patogena, te nosi certifikat o potpunom virucidnom djelovanju, uključujući Polio, Adeno, i Murine norovirus. Smatra se učinkovitim protiv svih virusa s ovojnicom, uključujući viruse: HIV, HBV, HCV, gripe, vakcinije i koronavirus.
- Sigurno za korisnike. Bez potrebe za zaštitnom opremom. Ne sadrži klasifikaciju opasnosti.
- Superiorno čišćenje i 10 puta brža dezinfekcija od standardnih dezinficijensa.
- AHP formula je nježna prema površinama i produžava životni vijek opreme. Bez tragova čišćenja.
- Može se koristiti u područjima visokog rizika u trgovinama, školskim i odgojnim ustanovama, zdravstvu i drugim sektorima.
- Unapređuje usklađenost dezinfekcije za 35%

Upute za korištenje

Čišćenje i dezinfekcija prskanjem:

1. Uklonite krupnu prljavštinu.
2. Naprskajte na krpu i obrišite površinu ili direktno nanesite na površinu uz pomoć prskalice.
3. Nakon kontaktnog vremena prebrišite površinu ili ostavite da se osuši na zraku.

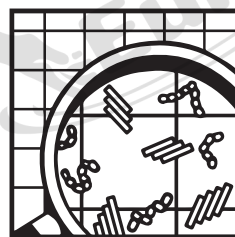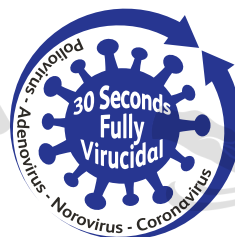

©A.I.S.E.

**Ova doza je u skladu s optimalnim uvjetima, preporuke mogu varirati, molimo konsultujte se sa svojim Diversey predstavnikom za upute.*



Oxivir Excel

Čišćenje i dezinfekcija uz pomoć kante:

1. Uklonite krupnu prljavštinu.
2. Nanesite rastvor na površinu krpom ili mopom.
3. Nakon kontaktnog vremena prebrišite površinu ili ostavite da se osuši na zraku.
4. Promijenite rastvor ukoliko postane vidno zaprljan ili nakon svaka 24 sata.

Brisanje uz pomoć sistema jednokratnih suhih maramica:

1. Pripremite sistem jednokratnih suhih maramica s rastvorenim sredstvom, prateći upute.
2. Uklonite krupnu prljavštinu.
3. Uzmite jednu maramicu i prebrišite površinu.
4. Nakon kontaktnog vremena prebrišite površinu ili ostavite da se osuši na zraku.
5. Promijenite maramicu kada bude vidno zaprljana, kada površina nije dovoljno vlažna ili kada prelazite na čišćenje druge površine.

**Pobrinite se da površina bude mokra tokom kontaktnog vremena.*

Doziranje:

Za postizanje određenih zahtjeva za dezinfekciju slijedite preporučeno doziranje (pogledajte tabelu na sljedećoj stranici).

Tehnički podaci

Izgled: providna bezbojna tečnost

pH vrijednost (konc): 0.55

pH vrijednost (pri upotrebi): 1.9

Relativna gustoća (20°C): 1.065

Gore navedeni podaci tipični su za normalnu proizvodnju i ne bi se trebali smatrati specifikacijom.

Informacije o sigurnom rukovanju i skladištenju

Kompletna vodič o rukovanju i odlaganju ovog sredstva je dostupan u zasebnom sigurnosno-tehničkom listu; sds.diversey.com. Čuvati u originalnom zatvorenom pakovanju i izbjegavati ekstremne temperature. Samo za profesionalne korisnike/specijaliste.

Reaguje na supstance koje oksidiraju. Rok trajanja 2 godine od datuma proizvodnje.

Kompatibilnost proizvoda

Bitno: Nemojte miješati s drugim proizvodima. Ne koristiti toplu vodu. Nemojte koristiti s površinama koje su osjetljive na vodu i kiseline. Ako se koristi na preporučen način, sredstvo Oxivir Excel je pogodno za korištenje na većini materijala poput: nehrđajućeg čelika, kroma, vinila, najlonskih materijala, laminiranih površina, stakla, gume, tvrde i fleksibilne plastike (polipropilen, poliuretan, polietilen, PVC akril, fiberglas i polikarbonat).

Mikrobiološki podaci

Pogledajte tabelu na posljednjoj stranici

Informacije o okolišu

Surfaktanti koji se koriste u ovom proizvodu su biorazgradivi u skladu sa zahtjevima EU Uredbe o deterdžentima, EC 648/2004.

Dostupna pakovanja

Sredstvo Oxivir Excel je dostupno u pakovanjima od 6x1L i 2x5L.

AHP®, Design i Oxivir® su zaštitni znakovi kompanije Diversey, Inc.

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Sva prava pridržana.

DiverseyTM

Oxivir Excel

		Prljavi uvjeti	
		Kontaktno vrijeme	Rastvor
Baktericidno	EN 1276*	1 min 5 min	1,25% 1%
	EN 13727	30 sec 5 min	2% 1,5%
	EN 13697*	5 min	1.50%
	EN 16615	1 min	1.00%
Virucidno	EN 14476 Adenovirus, Poliovirus, Murine Norovirus	30 sec 5 min	4% 1,5%
		30 sec 5 min	4% 1,5%
		30 sec 5 min	4% 2%
	EN 16777 Adenovirus EN 16777 Murine Norovirus	30 min	4%
Fungicidno	EN1650*	5 min	3.75%
	EN13624	5 min	4.00%
	EN 13697*	5 min	3.50%
	EN 16615	1 min	1.00%
* Testirana teška zaprljanja u nezdravstvenom okruženju			

UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA BIH:

Eurosan d.o.o.

Bišće polje bb, Mostar

Telefon: +387 36 342 220

www.eurosan.ba